

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Quand puis-je commencer à prendre mes scans Dental Monitoring ?

Vous pouvez commencer à prendre des scans dès que votre docteur décide de commencer le monitoring. Vous recevrez un e-mail à ce moment-là. Téléchargez l'appli, entrez votre code, et c'est parti !

Quelle est la fréquence des scans ?


La fréquence des scans est établie par votre orthodontiste. Il/Elle peut également demander un nouveau scan en dehors de la fréquence fixée, si besoin est.

Comment savoir s'il est temps de prendre scan ?


Quand un scan est disponible, vous recevrez une notification et le premier bouton de la page d'accueil de votre appli indiquera "Scanner mon sourire". Touchez ce bouton, et vous pouvez commencer !

Comment mettre l'écarteur Dental Monitoring en bouche ?


Lavez l'écarteur à l'eau tiède et au savon puis séchez-le. Ensuite, insérez l'écarteur, l'arc vers le bas. Si l'écarteur est trop grand ou trop petit pour vous, demandez-en un nouveau de taille adaptée à votre orthodontiste. L'écarteur est essentiel car il comporte des points de repère nécessaires à la réalisation de nos calculs.

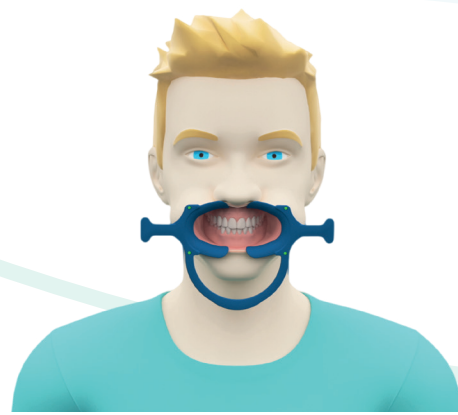

N'hésitez pas à regarder notre tutoriel vidéo pour une démonstration sous forme d'animation.

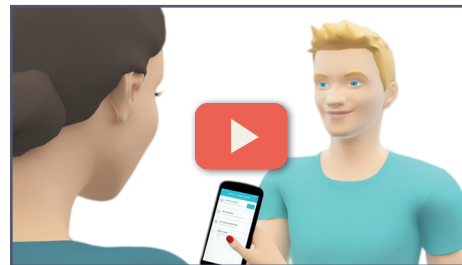

La vidéo est disponible sur votre appli !

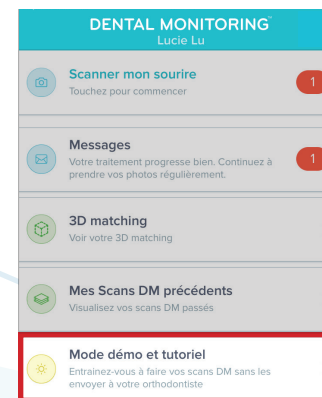

Nous sommes toujours ravis d'entendre vos commentaires et suggestions. N'hésitez pas à prendre contact avec nous et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.

Téléphone : +33 (0)1 86 95 01 01

E-mail : support@dental-monitoring.com



FR - v.2.2
Mars 2017

Dental Image
261 rue de Paris,
93100, Montreuil.
(+33) 1 86 95 01 01




DENTAL MONITORING®

Orthodontie connectée



VOS SCANS DM MODE PHOTO


RÈGLES D'OR

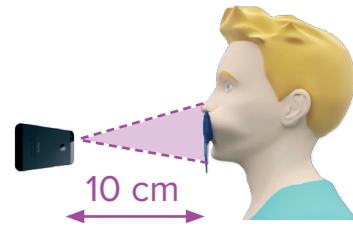

Pour prendre des photos de qualité, il est important de respecter les points suivants :

L'écarteur

Portez votre écarteur Dental Monitoring pour tout scan. Pour les photos de côté, tirez sur la languette de l'écarteur afin que les dents les plus reculées soient visibles. La languette sur laquelle il faut tirer dépend du côté dont la photo est prise.

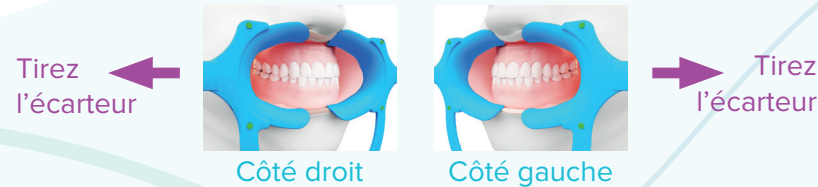

La visibilité

Montrez-nous vos dents ! Elles ne doivent pas être cachées par vos lèvres, votre langue ou l'écarteur.


La distance

Le smartphone doit se situer à 10 cm environ de l'écarteur. Le champ de la photo doit se limiter du menton au nez (le champ violet sur l'illustration ci-dessus représente la bonne distance).


L'angle

Quand vous commencez votre scan, des icônes explicatives apparaissent sur l'écran avant chaque photo. Suivez ces indications lors du scan pour visualiser le résultat attendu. L'angle horizontal correspond à l'icône située à gauche de l'écran. L'angle vertical, lui, correspond à l'icône située à droite de l'écran. Observez l'illustration située au milieu pour reproduire une photo similaire.


Selon votre type de monitoring, votre scan comporte de 6 à 13 photos. Il vous suffira de suivre les indications données par l'application.

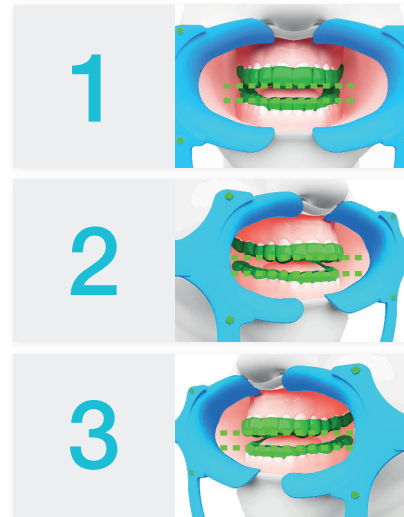


BOUCHE OUVERTE (avec aligneurs)

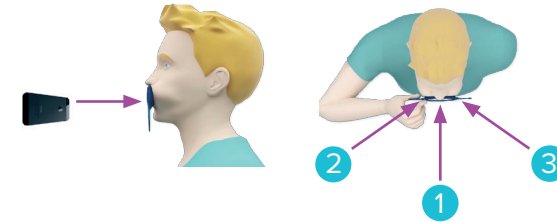


- Pour les photos 1 à 3, mettez vos aligneurs.
- La caméra est à la hauteur de la bouche.
- Pour les photos 2 et 3, la caméra est presque de profil par rapport à votre visage, tirez sur la languette de l'écarteur.

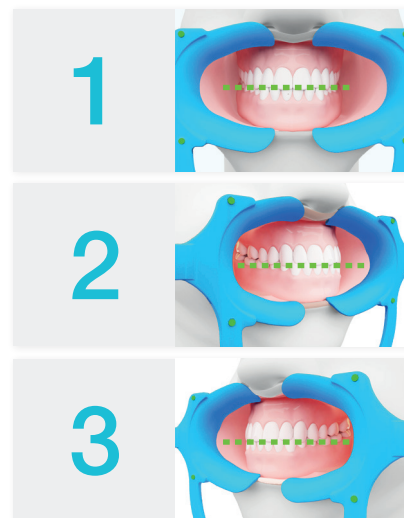


DENTS SERRÉES (sans aligneurs)

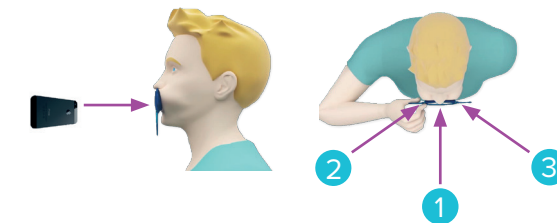


- La caméra est à la hauteur de la bouche.
- Pour les photos 2 et 3, tirez sur la languette de l'écarteur afin de montrer la dent la plus reculée.

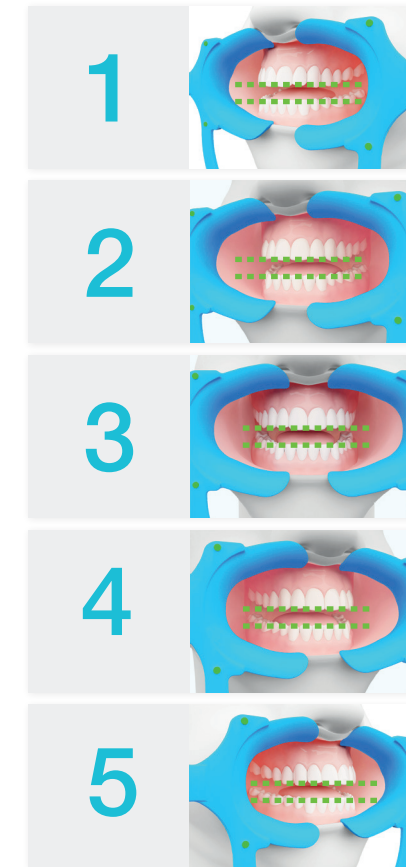


BOUCHE OUVERTE (sans aligneurs)

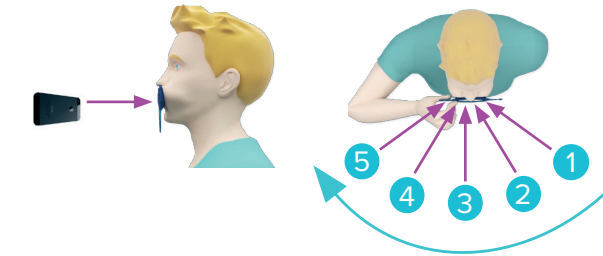

- La caméra est à la hauteur de la bouche.
- Pour les photos 1 et 5, la caméra est presque de profil par rapport à votre visage.
- Pour les photos de côté, tirez sur la languette de l'écarteur afin de montrer la dent la plus reculée.

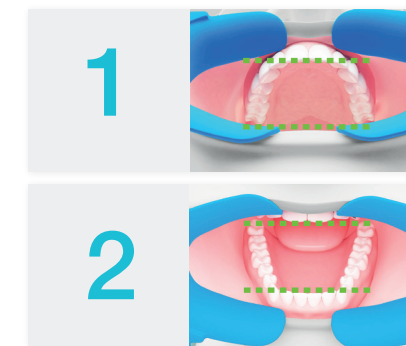

BOUCHE GRANDE OUVERTE (sans aligneurs)

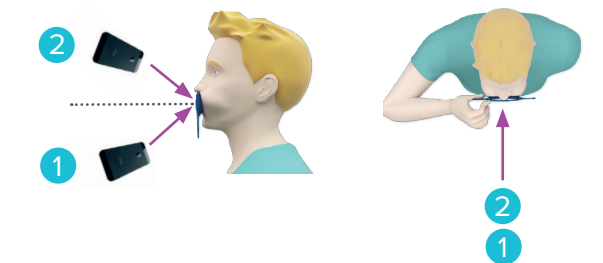

- Pour la photo 1, la caméra est à la hauteur du menton et inclinée vers le haut.
- Pour la photo 2, la caméra est à la hauteur du nez et inclinée vers le bas.